


● CLOVER NEX'Γ®

— EASYAL

ACIDO IALURONICO

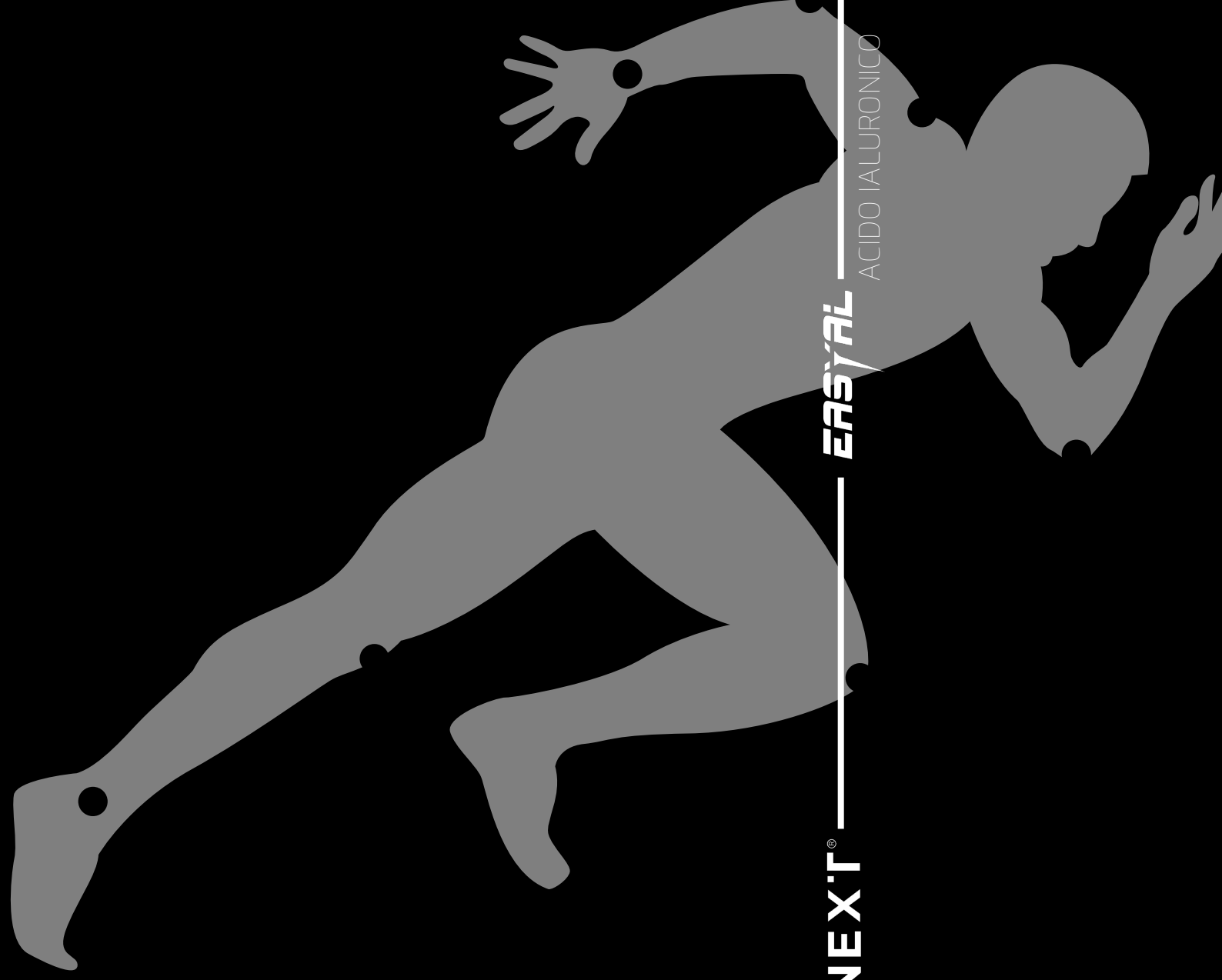

## UNA TERAPIA DE VANGUARDIA PARA LAS ARTICULACIONES

En las enfermedades reumáticas y degenerativas de las articulaciones, se produce una disminución de la concentración y del peso molecular del ácido hialurónico, lo que conlleva una reducción de la viscosidad del líquido sinovial. Esto provoca el deterioro de la funcionalidad articular y la aparición de dolor.

La administración intraarticular de ácido hialurónico permite restablecer la viscoelasticidad del líquido sinovial, favoreciendo una mejora significativa de la movilidad articular, así como la reducción del dolor y de la respuesta inflamatoria.

EASYAL es un producto a base de sal sódica de ácido hialurónico con marcadas propiedades viscoelásticas, altamente purificado, con un peso molecular comprendido entre 1.000 y 1.500 KDalton. Está disponible en dos presentaciones:

- 40 mg / 2 ml (2%)
- 80 mg / 4 ml (2%)

El hialuronato de sodio es un componente fundamental del líquido sinovial, al que confiere sus propiedades viscoelásticas. El hialuronato de sodio de EASYAL se obtiene mediante fermentación y posterior purificación.


El producto se presenta en jeringas de vidrio listas para usar en dos formulaciones: EASYAL2 y EASYAL4.

El protocolo EASYAL2 (40 mg/2 ml) prevé un ciclo de 3 administraciones semanales, que permiten disminuir el dolor y la inflamación y recuperar la funcionalidad articular.

---

### ARTICULACIONES MÁS FRECUENTEMENTE TRATADAS:

- HOMBRO
- MANO
- CADERA
- RODILLA
- PIE

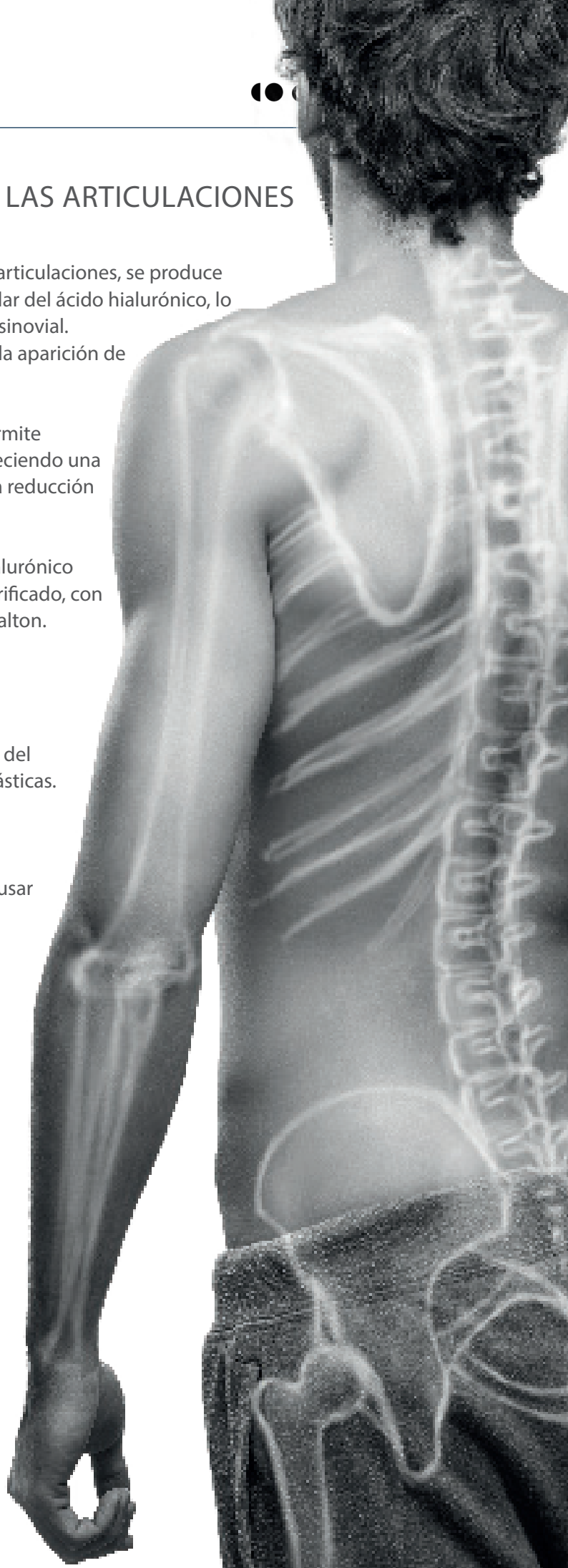

## MODO DE USO

Aspirar la posible efusión de la articulación antes de inyectar EASYAL. Retirar el tapón de la jeringa procurando evitar el contacto. Insertar una aguja del calibre adecuado (de 18 a 22 G) y enroscarla firmemente asegurándose de que esté perfectamente ajustada para evitar fugas de la solución. Inyectar la solución exclusivamente en el espacio sinovial, a temperatura ambiente y en condiciones asépticas.



Caja que contiene 1 jeringa desechable precargada (una jeringa contiene 40 mg de ácido hialurónico en 2 ml de solución apirógena). Jeringas esterilizadas.



Caja que contiene 1 jeringa desechable precargada (una jeringa contiene 80 mg de ácido hialurónico en 4 ml de solución apirógena). Jeringas esterilizadas.

## DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO

EASYAL2 (40 mg) Inyección intraarticular de 2 ml de producto una vez por semana durante tres semanas, salvo distinta indicación del médico y en función de las condiciones del paciente.


En caso de ser necesarios otros ciclos de tratamiento, dejar transcurrir al menos 6 meses. Si el médico lo considera oportuno y según las condiciones del paciente, es posible tratar varias articulaciones al mismo tiempo.

EASYAL4 (80 mg) Inyección intraarticular de 4 ml de producto en una única administración, salvo distinta indicación del médico y en función de las condiciones del paciente.


En caso de ser necesarios otros ciclos de tratamiento, dejar transcurrir al menos 6 meses. Si el médico lo considera oportuno y según las condiciones del paciente, es posible tratar varias articulaciones al mismo tiempo.

EL ÁCIDO HIALURÓNICO es una molécula formada por cadenas lineales de polisacáridos responsables de la elasticidad y de la capacidad de absorber energía; cuando el líquido sinovial se encuentra en buenas condiciones, contiene altas concentraciones de ácido hialurónico.

Gracias a su capacidad de retener agua, el ácido hialurónico ejerce un efecto elástico capaz de mejorar la lubricación y las propiedades amortiguadoras del cartílago. En los pacientes con artrosis, el ácido hialurónico se deteriora, perdiendo sus propiedades de elasticidad y viscosidad, lo que conduce a una progresiva degeneración articular.

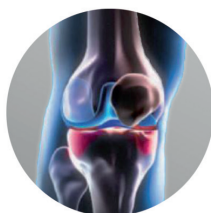

Articulación de la rodilla con artrosis

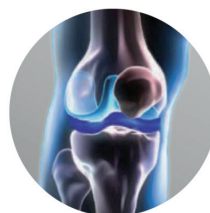


Articulación de la rodilla después del tratamiento con EASYAL

Los tratamientos para esta patología son los siguientes:

- Terapias farmacológicas sistémicas a base de AINE o analgésicos;
- Terapias no farmacológicas como la rehabilitación muscular y la reducción del estrés físico;
- Terapias farmacológicas locales como inyecciones de corticoides y terapias intraarticulares con ácido hialurónico (viscosuplementación).

Facilitando el deslizamiento de las superficies articulares, la inyección de ácido hialurónico tiene el efecto inmediato de restablecer los parámetros normales del líquido sinovial.

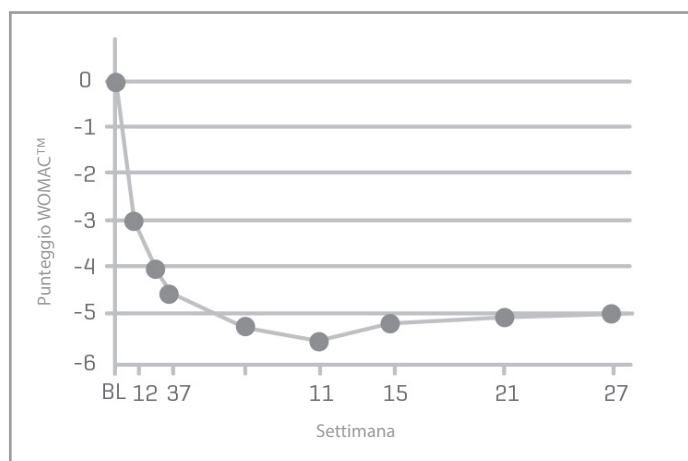

El diagrama muestra cómo EASYAL es eficaz para reducir el dolor ya después de la primera inyección.

Tras tres administraciones, la movilidad, tanto en términos de flexión como de extensión, ha aumentado notablemente.

*No se han registrado efectos secundarios ni reacciones sistémicas.*

